

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Metodo immunocromatografico




CE Registrazione Ministero Salute n. 2009292

- Nessun strumento necessario
- Nessuna estrazione di acidi nucleici
- Rilevazione diretta dell'antigene virale
- Incluso tampone nasale ultra sottile
- Risultati in 10-15 minuti

Metodo immunocromatografico con doppio anticorpo "sandwich"

Questo kit utilizza il metodo del doppio anticorpo-sandwich per rilevare gli antigeni SARS CoV-2. Quando una quantità appropriata di campione viene dispensata nel pozzetto campione (S) del dispositivo, il campione si diffonde lungo il dispositivo. Se il campione contiene l'antigene, questo si lega all'anticorpo SARS-CoV-2 marcato con oro colloidale presente nel reagente di estrazione e formerà un immunocomplesso sandwich con un altro anticorpo anti-SARS-CoV-2 fissato sull'area del test che mostrerà una linea colorata visibile, indicante che il test è positivo.

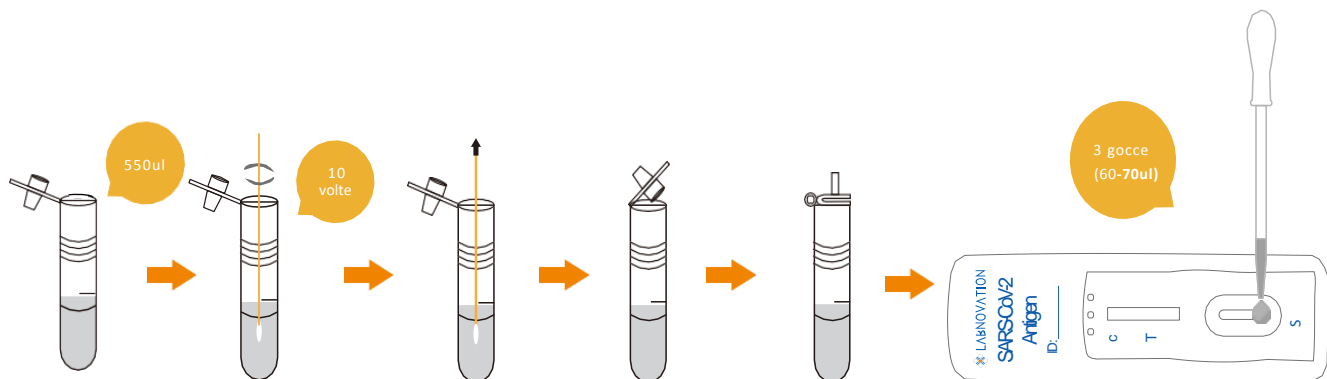

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

